

津 梁 玉 衡

JL41 婴儿体重秤/电子婴幼儿秤/医院专用儿保秤



产品概述：

电子婴儿秤是交直流两用的特种电子衡器，本产品采用了高精解析传感器和专用微电脑控制，具有高亮度背光、自动调整零点、计量高、数字显示稳定、计量速度快、使用操作方便等突出优点。本产品广泛使用于医院、妇幼保健站检测婴儿体重之用。

技术性能：

- 1、称量：20kg
- 2、称量：50g
- 3、分度值：5g
- 4、：符合 OIML III 级秤标准
- 5、显示方式：5 位 LCD 液晶显示，背带光源
- 6、自动关机功能：10 分钟自动关机（可选）
- 7、超载报警功能：当超过称量时，显示器显示“.....”报警。
- 8、电源电压：采用交直流两用，外接 DC9V/200mA 稳压器，0.2W；直流免维护可充电电池（6V、5Ah）。
- 9、工作环境：5°C~+40°C≤90%RH 无结露。

注意事项：

- 1、开箱后，将秤置于水平的平面上，对照水平仪调整四个支脚，直至秤平稳，否则会影响秤的称重。
- 2、秤的清洁，应采用柔软的干湿布轻轻擦显示屏及秤体。禁止用带有腐蚀性的溶液及水擦洗。
- 3、显示器显示闪烁电池符号时，表示电瓶电力不足，需要充电，充电时把外接 DC9V/50mA 稳压器的输出线插入婴儿秤的充电输入插孔，此时充电指示灯亮，（如长期不用，也应三个月充电）充电约 8-10 个小时。

操作功能键：

- 1、[ON/TARE]（开机/去皮）：开机/去皮键是一个双功能键，用于打开整机电源或在正常称重时的去皮功能。
- 2、[OFF]（关机）：用于关闭整机电源。
- 3、[MODE]（功能键）：在未锁定状态下，按此键可将计重单位“g”转换“LB”。

天 津 津 梁 仪 器 设 备 有 限 公 司

津 梁 玉 衡