

津 梁 玉 衡

JL53 婴儿移动式量床/医院专用电子婴儿秤

产品概述:

婴儿体重秤是开发的测量婴幼儿体重和身高（坐高）两用的特种电子衡器；采用了高解析传感器（LOAD CELL）和专用微电脑控制，具有公英制转换、自动调整零点、计量高、数字显示稳定

、计量速度快、可以测量婴儿身高与坐高、使用操作方便等特出优点。

电子婴儿秤广泛适用于医院、妇幼保健站检测婴儿体重、身高之用。

技术参数:

称量: 20kg

分 度 值: 20g

精 度: 符合 OIML III级秤标准示

显示方式: 6 位 LCD 液晶显示

交流电压: 220V±10% 50HZ

直流电压: 6V 1.2AH/20HR

身高测量范围: 0-100cm 分度值: 1mm

测量摆幅: ≤5mm 侧板位移力: ≤10N

超载报警功能: 当超出称量时, 显示器“~”报警

工作环境: 5℃~40℃, ≤90%RH 无结露

外型尺寸: 105×53×49 cm

外包装尺寸: 112×57×32cm

毛重: 20 kg 净重: 14kg

电子婴儿秤带柜子量身高

操作键功能:

- 1、置零键: 当秤台上的重量≤2%FS, 按[置零]键有效, 重量显示为零且零位指示灯亮。
- 2、去皮键: 当秤台上的重量≤100%FS, 按[去皮]键有效, 去皮指示灯亮且清除皮重。
- 3、累加键: 加载重物, 按累加键, 累加指示灯亮, 交替显示累加重量和累加次数（加重前必须先按去皮键使仪表回零）, 累加次数不超过 99 次, 重量不超过 999999;
- 4、kg/Lb: 按此键可以选择称量显示单位公斤或磅。
- 5、累清键: 在设置状态下为确认键, 称重状态下用于消除累加的称重数据。

安装及注意事项:

- 1、婴儿体重秤开箱后, 将秤置于水平的平面上, 调整四个支脚, 直至秤平稳, 否则会影响秤的称量。
- 2、将秤的立柱和秤台连接并拧紧螺母即可。
- 3、接通电源, 打开仪表右侧的船型开机开关, 电子体重秤进入自检状态二秒钟, 稳定后显示零, 即进入称重状态。
- 4、秤的清洁, 应采用柔软的干湿布轻轻擦显示屏及秤体。禁止用带有腐蚀性的溶液及水擦洗。
- 5、测量板的移动需要用力均匀, 否则会影响测量滑板的流畅感。

装箱清单:

电子婴儿秤.....1 台

充电器.....1 个

津 梁 玉 衡

保修卡.....1 份
装箱单.....1 份
使用说明书.....1 份



天津津梁仪器设备有限公司